



DE **Allgemeine Anmerkungen zum Alkoholtest - Gebrauchsanleitung**

Der Alkoholtest ist für den einmaligen Gebrauch konzipiert und dient der Bestimmung des Alkoholgehalts in der ausgeatmeten Luft. Mit diesem Test kann der Blutalkoholgehalt mit einer Genauigkeit von 0,2‰ (Promille), das heißt 0,1 mg/L in der ausgeatmeten Luft, ermittelt werden. Der Alkoholspiegel steigt in der Regel bis zu etwa einer Stunde nach dem Alkoholkonsum an. Weitere Faktoren wie individuelle Fitness, Konsumrate, Art des Alkohols, sowie die Aufnahme von Nahrung können den Alkoholspiegel beeinflussen.

Bitte beachten!

Die Ergebnisse dieses Alkoholtests sind nicht als Beweismittel in rechtlichen Verfahren verwendbar, insbesondere nicht zur Feststellung eines Alkohol- oder Rauschzustandes. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Interpretation der Testergebnisse. Diese Ergebnisse sollten nicht dazu genutzt werden, die Ergebnisse von Tests, die von Beamten oder auf deren Veranlassung durchgeführt wurden, infrage zu stellen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine Nutzung des Produkts, die nicht den Anweisungen entspricht.

Der Hersteller übernimmt keine rechtliche Verantwortung für das Ergebnis des Tests.

Für ein möglichst genaues Ergebnis sollte die Messung frühestens 15 Minuten nach dem letzten Alkoholkonsum erfolgen. Rauchen sowie der Konsum bestimmter Lebensmittel und Getränke können das Ergebnis verfälschen. Daher sollte auch hier ein Abstand von mindestens 15 Minuten eingehalten werden.

Komponenten

Der Alkoholtest besteht aus einem Glasrohr, Adsorptionsgranulat, Filtern, Alufolie und zwei Schutzkappen.

Achtung!

Die Komponenten des Alkoholtests können bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein. Das Glasrohr kann brechen und zu Verletzungen führen, andere Teile können verschluckt werden. Nach Gebrauch sollte der Test im Hausmüll entsorgt werden. Der benutzte Test stellt keine Umweltgefahr gemäß EU-Richtlinien dar. Es wird empfohlen, gebrauchte Tests nicht an Orten zu hinterlassen, an denen sie in unbefugte Hände gelangen könnten.

Anwendung:

1. Drücken Sie auf die Kunststoffschutzkappen auf beiden Seiten des Alkoholtests, bis Sie Widerstand spüren, um die Schutzfolie zu durchstoßen.
2. Atmen Sie tief ein und blasen Sie Luft in Richtung der Pfeile auf dem Alkoholtester in das Mundstück (zweimal für ca. 10 Sekunden).
Stellen Sie sicher, dass die Luft auf der anderen Seite des Alkoholtesters austritt.
3. Lesen Sie nach 2 Minuten spätestens jedoch nach 5 Minuten das Testergebnis ab.
4. Wenn sich die Farbe im mittleren Teil des Glasrohrs ändert, bedeutet das, dass Alkohol im Blut vorhanden ist.
5. Vergleichen Sie die Farbe des Alkoholtests mit der Skala auf der Verpackung. Die genauesten Ergebnisse erhält man bei Tageslicht. Ein Wert, der dem auf der Verpackung angegebenen Wert von 0,2 ‰ ähnelt, zeigt eine Blutalkoholkonzentration von 0,2 ‰ oder mehr an.

Ein Blutalkoholgehalt von 0,2‰ kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und stellt eine Gefahr für das eigene Leben und die Gesundheit sowie ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer dar.

Achtung!

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Höchstwerte des Blutalkoholgehalts in Ihrem Land!

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bewahren Sie den Alkoholtest außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Die Entnahme der Messsubstanz aus dem Alkoholtest ist verboten.
3. Führen Sie die Messung nicht unmittelbar nach dem Einfüllen von alkoholhaltigem Scheibenreiniger durch, da die Dämpfe das Ergebnis verfälschen können.
4. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Messsubstanz mit Augen und Haut.
5. Die Messsubstanz darf weder eingeatmet noch verschluckt werden.
6. Werfen Sie den Alkoholtest nicht ins Feuer.
7. Bei Kontakt der Messsubstanz mit den Augen, das Augenlid weit öffnen und gründlich mit Wasser ausspülen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, ein Augenarztbesuch ist ratsam.
8. Bei Hautkontakt, die betroffene Stelle mit viel Wasser abspülen. Bei Hautirritationen (Rötungen, Ausschläge, allergische Reaktionen, Wunden) sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und einen Dermatologen aufsuchen.
9. Bei Verschlucken der Messsubstanz viel Wasser trinken, jedoch keine Würgereaktion auslösen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
10. Bei Einatmung der Messsubstanz sofort an die frische Luft gehen. Gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufsuchen.

Aufbewahrungstipps:

1. Vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen schützen.
2. An einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Autorisierter Händler:

Giga Consulting
Daniel Holdinghausen

Jeanette-Wolff-Str. 7
12355 Berlin
GERMANY

E-Mail: kontakt@giga-agentur.de

Der Alkoholtest wird in Europa hergestellt.

Hersteller des Alkoholtests: Test and Drive offene Handelsgesellschaft mit dem Sitz in Zielona Góra an der Dolina Zielona Straße 54 in Polen